

INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest

Umweltfreundlich/Environmentally friendly

Gebrauchsanweisung

In vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung


1. EINLEITUNG

Der INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest weist das Vorhandensein des Schwangerschaftshormons hCG schon nach dem ersten Tag nach dem Ausbleiben der Regel nach.

Einfache Anwendung:	Urin wird in die Probenöffnung getropft.
Rasche Ergebnisse:	Das Resultat liegt nach 3 bis 5 Minuten vor.
Zuverlässigkeit:	Bei richtiger Durchführung ist der INTEX [®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest mit einem Labortest vergleichbar.
Flexibel:	Der INTEX [®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest ist schon am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel zu jeder Zeit durchführbar.

2. INHALT DER TESTPACKUNG

- 1 Schwangerschaftstest
- 1 Pipette
- Trockenmittel – *Achtung:*
Das Trockenmittel ist kein Testbestandteil, bitte mit dem Hausmüll entsorgen!
- 1 Gebrauchsanweisung

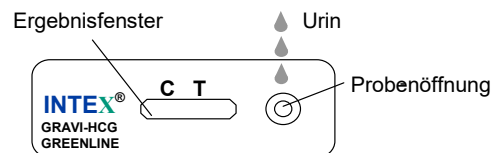

3. ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES MATERIAL (nicht mitgeliefert)

- sauberes und trockenes Gefäß zur Probengewinnung
- Stoppuhr

4. TESTDURCHFÜHRUNG UND TESTAUSWERTUNG

1. Sammeln Sie die Urinprobe in einem sauberen, trockenen Gefäß. Morgenurin weist die höchste Konzentration von hCG auf, es kann jedoch der Urin von jeder Tageszeit verwendet werden.


2. Nehmen Sie den Test unmittelbar vor der Verwendung aus dem Folienbeutel und legen Sie ihn auf eine saubere, trockene, waagerechte Unterlage.

3. Ziehen Sie mit der mitgelieferten Pipette Urin auf, halten Sie die Pipette dabei senkrecht und pipettieren Sie 3 Tropfen (oder 120 µl -> siehe Markierung auf der Pipette) ohne Luftblasen in die runde Probenöffnung (siehe Grafik).

4. Lesen Sie das Resultat nach drei – fünf -Minuten ab.

5. Testauswertung:

Ergebnisfenster:

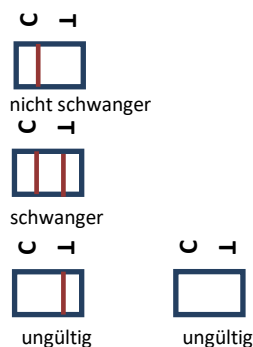

Wenn im Ergebnisfenster nur eine rote Linie (Kontrolllinie C) erscheint, können Sie davon ausgehen *nicht schwanger* zu sein.

Wenn im Ergebnisfenster zwei rote Linien erscheinen, können Sie davon ausgehen schwanger zu sein. Dieses Resultat *schwanger* gilt auch wenn eine der beiden Linien nur schwach sichtbar ist.

Der mit C markierte Bereich des Ergebnisfensters enthält eine integrierte Kontrollfunktion und dient der Qualitätskontrolle. Sollte in diesem Bereich (C) des Ergebnisfensters keine Linie erscheinen, so bedeutet dies, dass der Test nicht korrekt durchgeführt wurde oder nicht funktionsfähig ist; das Resultat ist ungültig.

WICHTIG! Es ist vollkommen normal, dass die Linien unterschiedlich breit oder stark gefärbt sind. Bestehen nach 5 Minuten der Durchführung noch Zweifel, so lesen Sie den Test nach weiteren 5 Minuten noch einmal ab. Es kann unter Umständen nun einfacher sein den Test zu interpretieren. Später darf der Test nicht mehr abgelesen werden.

5. HÄUFIGE FRAGEN

Wie funktioniert der Test?

INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest weist das bei der Schwangerschaft in der Frau produzierte Hormon hCG im Urin nach. Schon am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel kann INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest dieses Hormon nachweisen.

Ab wann kann ich INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest verwenden?

Der Test kann schon am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel verwendet werden. Sollte der Test früher durchgeführt werden, ist der hCG Gehalt im Urin möglicherweise unterhalb der Nachweisgrenze von 20mIU/ml und der Test weist ein falsch negatives Ergebnis auf.

Muss ich den Test sofort nach Entnahme aus der Schutzfolie durchführen?

Ja, denn der Test ist feuchtigkeitsempfindlich. Der Test muss innerhalb von 30 Minuten nach dem Öffnen der Hülle durchgeführt werden, da sonst das Resultat ungültig sein kann.

Muss ich Morgenurin verwenden?

Nein, man kann den Urin von jeder Tageszeit verwenden, jedoch ist die Konzentration von hCG bei Morgenurin am höchsten.

Woher weiß ich, ob ich ausreichend Urin verwendet habe?

Drei volle Tropfen sind in jedem Fall ausreichend. Sollte nach einer Minute keine rosafarbene Linie erscheinen, geben Sie sofort noch einen Tropfen Urin nach. Ist dies nicht möglich, sollten Sie den Test später mit einem neuen Test wiederholen. Generell schadet zu viel Urin dem Testergebnis nicht, eher zu wenig.

Wie zuverlässig ist das Resultat des Tests?

Bei richtiger Durchführung ist das Testresultat mit dem von Labortests vergleichbar.

Welche Bedeutung hat die Kontrolllinie?

Der Sinn der Kontrolllinie ist anzuzeigen, dass eine ausreichende Menge Urin für das korrekte Funktionieren des Tests aufgesogen wurde.

Sollte diese Linie nicht erscheinen, sollten Sie den Test mit einem neuen INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest wiederholen.

Ist das Resultat auch gültig, wenn die beiden Linien nicht gleich hell oder breit sind?

Ja, das Resultat ist von der Intensität der Linien nicht abhängig.

Muss ich 3 volle Minuten warten bis ich das Resultat ablese?

Für die endgültige Interpretation sollten die vollen 3 Minuten abgewartet werden. Zeigt der Test aber schon nach 1 Minute zwei rote Linien an, muss man nicht länger warten.

Wie lange bleiben die Linien sichtbar?

Das Ergebnis sollte nach spätestens 10 Minuten abgelesen werden um die Sichtbarkeit der Linien zu garantieren.

Kann das Ergebnis von Medikamenten oder Alkohol beeinflusst werden?

Alkohol beeinflusst das Ergebnis nicht. Nur sehr wenige Medikamente (diejenigen die hCG enthalten) können das Ergebnis beeinflussen. Medikamente wie Schmerzmittel, Antibiotika und die „Pille“ haben im Allgemeinen keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Kann das Ergebnis von Krankheiten beeinflusst werden?

Die Produktion von hCG durch eine Krankheit kann in ganz seltenen Fällen auftreten. Sollten Sie ein falsch positives Testergebnis vermuten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Was soll ich tun, wenn das Ergebnis aussagt, dass ich schwanger bin?

Wenden Sie sich in jedem Fall an Ihren Arzt um den weiteren Verlauf ihrer Schwangerschaft zu besprechen.

Was soll ich tun, wenn das Ergebnis aussagt, dass ich nicht schwanger bin?

Sollte trotz diesem Resultat Ihre Regel ausbleiben oder andere Symptome bestehen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Wohin kann ich mich mit weiteren Fragen wenden?

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte: service.ch@intex-biotech.com







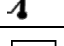

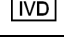



6. WARNHINWEISE

- Bewahren Sie den Test ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Test nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Die Packung muss vor Temperaturschwankungen geschützt werden, bewahren Sie den Test bei einer Temperatur zwischen 2°C und 30°C auf. Der Test muss bei Temperaturen zwischen 15°C und 28°C durchgeführt werden.
- Der Test darf nicht nass werden.
- Packung erst kurz vor Gebrauch öffnen.
- Der Test darf nur einmal verwendet werden und kann im Anschluss im Hausmüll entsorgt werden.
- Der Test ersetzt keinen Arztbesuch und dient einzig der Diagnose. Bei Zweifeln fragen Sie unbedingt Ihren Arzt.
- Die Gebrauchsanweisung vor der Durchführung sorgfältig lesen und beachten.
- Probenöffnung und Ergebnisfeld nicht mit den Fingern berühren, dies kann das Ergebnis beeinflussen.
- Nehmen Sie den Test nicht auseinander und nehmen Sie nichts aus der Testpackung ein.
- Kreuzreaktionen konnten in seltenen Fällen beobachtet werden, in denen Medikamente mit hMG (human Menopausal Genodotropin) eingenommen wurden.

7. TECHNISCHE DATEN

- hCG kann ab einer Menge von 20mIU/ml – 600mIU/ml nachgewiesen werden.
- Die Spezifität des INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstests beträgt >99%.
- Aktive Testkomponenten sind monoklonale Antikörper gegen hCG.

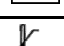8. SYMBOLERLÄUTERUNGEN

	Artikelnummer		nur zum Einmalgebrauch
	Chargennummer		Verwendbar bis
	Lager- und Transporttemperatur		Inhalt (Anzahl Tests)
	In vitro-Diagnostikum		Gebrauchsanweisung beachten
	Hersteller		CE-Kennzeichen
INTEX[®] Gravi hCG – Greenline Schwangerschaftstest Umweltfreundlich/Environmentally friendly			
		10 Testkassette	GH3310-UF
		30 Testkassetten	GH3330 -UF



INTEX[®] Biotech AG

Adlerstrasse 21
 CH-4052 Basel
 Tel.: +41 61 554 24 41
 Fax: +41 61 483 03 57
service.ch@intex-biotech.com

INTEX[®] Biotech GmbH Deutschland

Hegenheimerstrasse 18
 DE-79576 Weil am Rhein
 Tel.: +41 61 554 24 41; +49 7621 940 90 80
 Fax: +49 7621 940 90 85
idsan@intex-biotech.de

www.intex-biotech.com